

PADSCAN HD 5 - EXPERTLÄGE

SNABBINSTRUKTION



VÄLJ MELLAN EXPERTLÄGE OCH ENKELT LÄGE

Välj Inställning, Service, ange koden 123456 och bekräfta med OK. Välj Expertläge och bekräfta med OK.


STEG 1 - STARTA APPARATEN

Starta apparaten genom att hålla in Av/På knappen i ca 2 sekunder tills apparaten piper till.




STEG 2 - ANGE PATIENTGRUPP

Tryck på PATIENT och välj mellan man, kvinna, kvinna/hysterektomerad eller barn. Den valda patientgruppen markeras genom att symbolen får färg. Med barn menas barn under 120 cm i längd och under 25 kg i vikt. Ange ålder, personnummer och namn om du vill få med denna information på utskriften. Tryck sedan på OK.

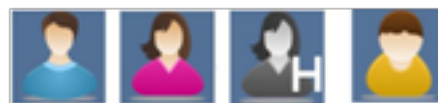

STEG 3 - FÖRE MÄTNINGEN

Patienten ska ligga på rygg och vara avslappnad. Applicera ordentligt med gel på magens mittlinje, ungefär 2 cm från symfyssen.

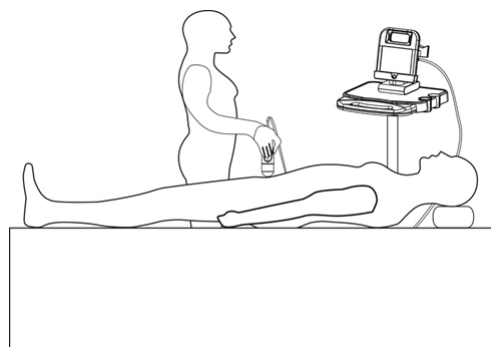


STEG 4 - PLACERING AV PROBEN

Placera proben i gelen och se till att knappen på proben är riktad mot patientens huvud. Vinkla proben nedåt mot lilla bäckenet på patienten.



STEG 5 - MÄTNING

Tryck in probeknappen en gång och släpp upp. Nu visar apparaten en sonografisk bild av blåsan. Vinkla, flytta och sök för att få största möjliga urinblåsbild. Om mittlinjen är orange är läget inte bra. Om mittlinjen är grön är probeläget bra, tryck då in probeknappen en gång till och släpp. Håll proben stilla när apparaten mäter blåsan i tolv olika plan. När mätningen är klar piper apparaten till och den uppmätta urinvolymen visas på skärmen.

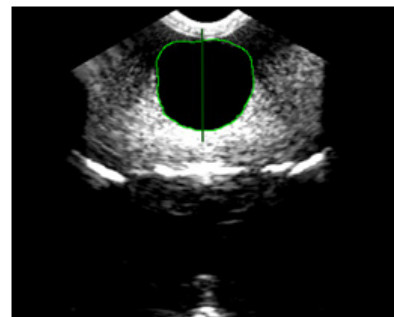

STEG 6 - EFTER MÄTNINGEN

Tryck på SKRIV UT om du vill ha en utskrift och tryck på SPARA om du vill spara mätningen. Padscan HD 5 kan spara upp till 100 undersökningar. Torka av gelen från proben med en 70 % spritlösning och torka sedan torrt.



PADSCAN HD 5 - ENKELT LÄGE

SNABBINSTRUKTION



VÄLJ MELLAN EXPERTLÄGE OCH ENKELT LÄGE

Välj Inställning, Service, ange koden 123456 och bekräfta med OK. Välj Enkelt läge och bekräfta med OK.


STEG 1 - STARTA APPARATEN

Starta apparaten genom att hålla in Av/På knappen i ca 2 sekunder tills apparaten piper till.




STEG 2 - ANGE PATIENTGRUPP

Tryck på PATIENT och välj mellan man, kvinna, kvinna/hysterektomerad eller barn. Den valda patientgruppen markeras genom att symbolen får färg. Med barn menas barn under 120 cm i längd och under 25 kg i vikt. Ange ålder, personnummer och namn om du vill få med denna information på utskriften. Tryck sedan på OK.

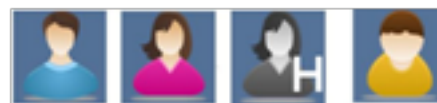

STEG 3 - FÖRE MÄTNINGEN

Patienten ska ligga på rygg och vara avslappnad. Applicera ordentligt med gel på magens mittlinje, ungefär 2 cm från symfylen.

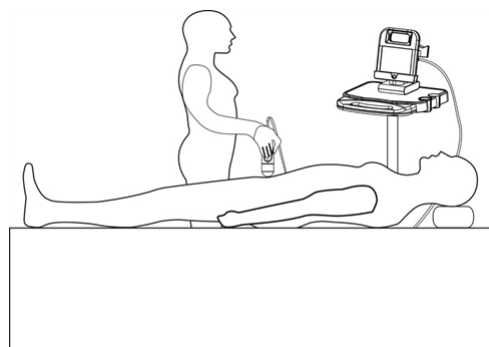


STEG 4 - PLACERING AV PROBEN

Placera proben i gelen och se till att knappen på proben är riktad mot patientens huvud. Vinkla proben nedåt mot lilla bäckenet på patienten.



STEG 5 - MÄTNING

Tryck in probeknappen en gång och släpp upp. Nu visar apparaten en symbolisk bild av blåsan. Vinkla, flytta och sök för att få största möjliga urinblåsbild. Om den symboliska blåsbilden är orange är läget inte bra. Om symboliska blåsbilden är grön är probeläget bra, tryck då in probeknappen en gång till och släpp. Håll proben stilla när apparaten mäter blåsan i tolv olika plan. När mätningen är klar piper apparaten till och den uppmätta urinvolymen visas på skärmen.

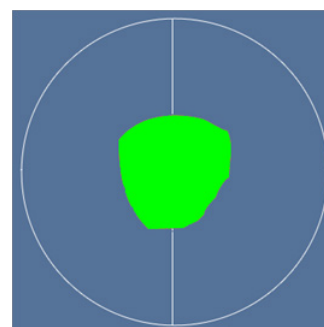

STEG 6 - EFTER MÄTNINGEN

Tryck på SKRIV UT om du vill ha en utskrift och tryck på SPARA om du vill spara mätningen. Padscan HD 5 kan spara upp till 100 undersökningar. Torka av gelen från proben med en 70 % spritlösning och torka sedan torrt.

